



## mikrozyd® AF törlőkendők

Aldehydmentes, gyors felületfertőtlenítésre használható kendők, alkoholos oldattal átítatva.

### Amit nyújt

- Felhasználásra kész fertőtlenítő kendők;
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum, a lehető legrövidebb behatási idő alatt;
- Gyorsan szárad;
- 150 db kendő/doboz vagy utántöltő tasak.

### Alkalmazási terület

- Egészségügyi intézmények felületeinek és berendezési tárgyainak alkoholos gyorsfertőtlenítésére, és minden olyan területen, ahol fokozott a fertőzés veszélye és követelmény a rövid behatási idő.
  - betegkezelő egységek;
  - vizsgáló asztalok;
  - műtőasztalok és hozzá tartozó berendezések;
  - egészségügyi berendezések felülete.

### Behatási idők és alkalmazási módok

Mikroorganizmusok	Behatási idők
Baktericid, fungicid (DGHM* lista rövid behatási időre vonatkozó irányelve alapján)	1 perc
MRSA (Multiresistant Staphylococcus Aureus)	2 perc
TBC	1 perc
Adenovírus	2 perc
HBV (HBsAg teszt), HIV	1 perc
HCV	30 mp
Rotavírus	30 mp
Poliovírus	30 mp
Papova SV 40	30 mp
DGHM* lista Felületfertőtlenítés egészségügyi intézményekre vonatkozó előírása alapján	5 perc
ÖGHMP** tapasztalatai alapján	1 perc

\* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

\*\* Osztrák Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

### Mikrobiológiai hatásspektrum

A mikrozyd® AF törlőkendők

- baktericid (MRSA, TBC is),
- fungicid,
- virucid (HBV, HCV, HIV, adeno-, rota-, papova-, poliovírus) hatással rendelkezik.

# Termékleírás

## Termék adatok

### Összetétel:

1 doboz vagy utántöltő tasak 150 db kendőt és 294 g aktív hatóanyagot tartalmaz.

1 g oldat:

- 0,25 g etanolt (94%-os),
- 0,35 g 1-propanolt tartalmaz.

### Kémiai / fizikai adatok

Megjelenés	tiszta, színtelen folyadék
Hőstabilitás	-5°C - +40°C
Fajsúly (20°C)	kb. 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás	< 15 másodperc (DIN 53211)
pH érték	kb. 6,0
Gyulladáspont	27°C (DIN 51755)

## Alkalmazás módja

A mikrozyd® AF törülközővel töröljük át a fertőtlenítenendő felületet úgy, hogy a felület nedves legyen, majd hagyjuk az oldatot a felületre rászáradni. Nagyobb felületnél több kendőt használunk.

## Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
150 db-os doboz	10 doboz / karton	109179
150 db-os utántöltő tasak	20 tasak / karton	109205
Jumbo 200 db-os doboz	10 doboz / karton	109157
Jumbo 200 db-os utántöltő tasak	12 tasak / karton	109159

## Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
Falra szerelhető fém doboztartó	1 db	134417

# mikrozyd® AF törülközők

## Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti jelölés

**R10:** Kevésbé tűzveszélyes!

## Figyelmeztetés

- Kerüljük el a szemmel történő érintkezést!
- Különösen alkoholérzékeny műanyagokat, mint pl. poliakril (akrilüveg) nem szabad mikrozyd® AF törülközőkkel kezelni!
- Gyermekek elől elzárva tartandó!

