


CE

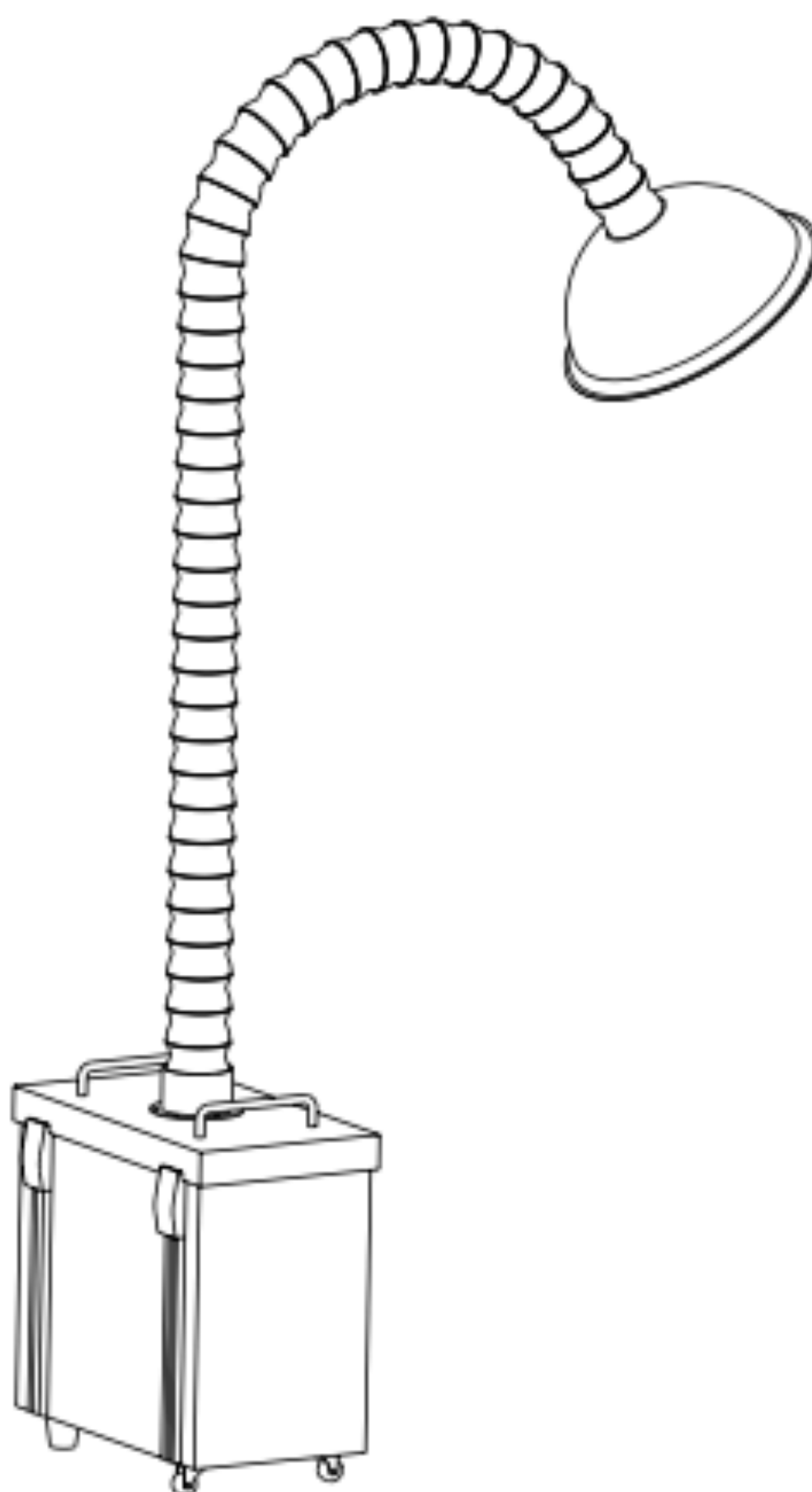

## VacStation Használati útmutató

# Tartalom

## 1. A VacStation áttekintése

## 2. A felhasználói kézikönyvben használt szimbólumok

## 3. Használat előtt

### 3.1 Rendeltetésszerű használat

### 3.2 Biztonsági útmutató

## 4. A VacStation telepítése

### 4.1 A védőhab eltávolítása

### 4.2 Telepítés

## 5. Felhasználói interfész

## 6. Beállítások

### 6.1 A levegő mennyiség beállítása

### 6.2 Légmennyiség-szabályzó csatlakoztatása

### 6.3 Kikapcsolás

## 7. Karbantartás

### 7.1 Tisztítás és fertőtlenítés

### 7.2 Szűrő csere

## 8. Hibaüzenetek


## 9. Műszaki adatok

## 10. EMC táblák







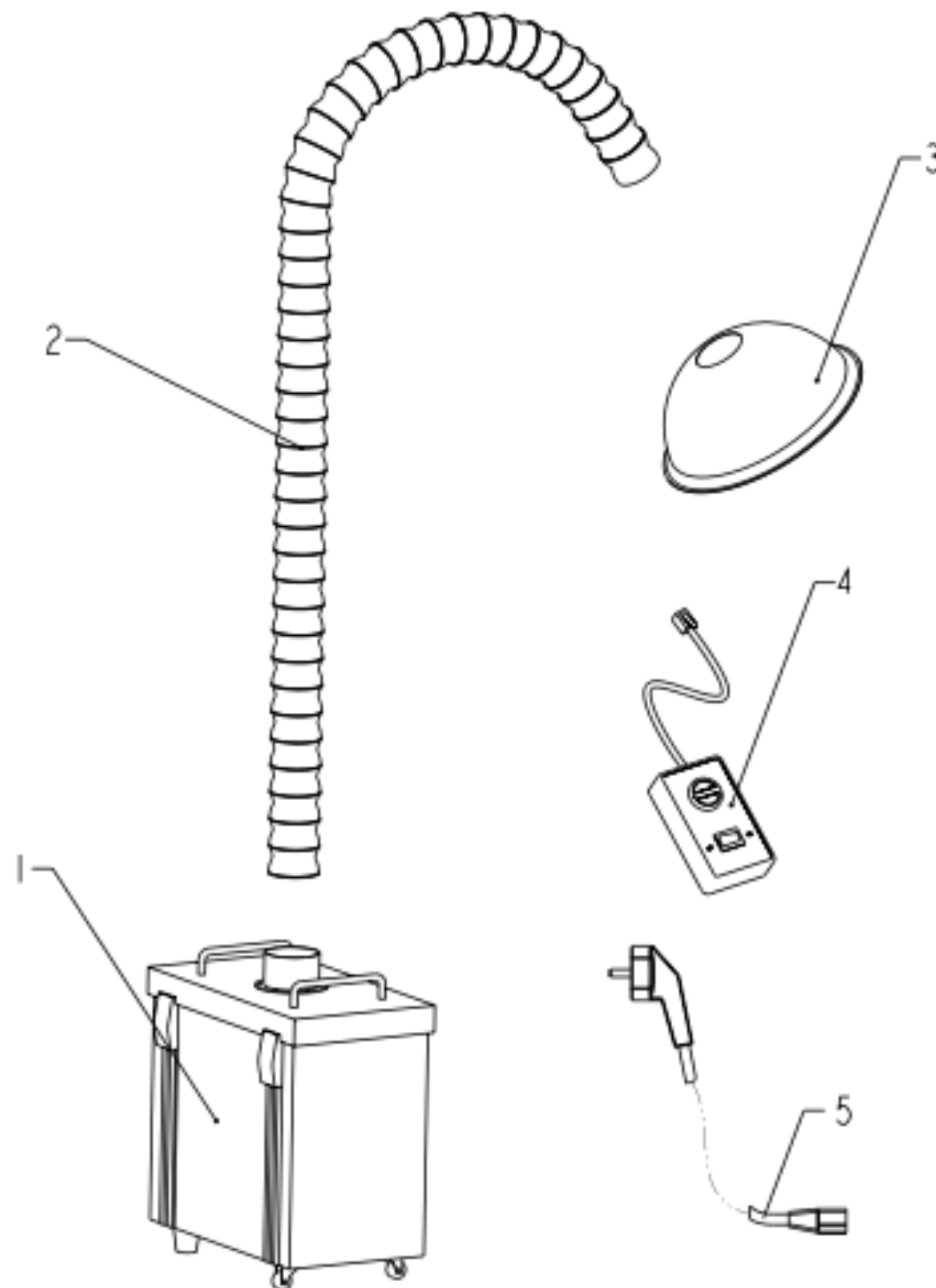




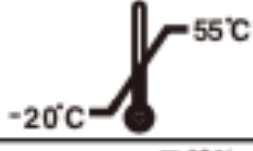

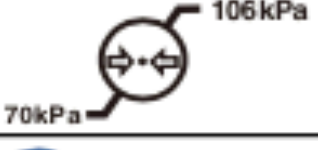



## 11. Nyilatkozat

# 1. A VacStation áttekintése

1. Motorház
2. Irányított légcsatorna
3. Elszívó
4. Légmennyiség-szabályzó
5. Tápkábel



## 2. A felhasználói kézikönyvben használt szimbólumok.

 <b>WARNING</b>	Ha az utasításokat nem tartják be megfelelően, akkor a működés veszélyeket okozhat a termék vagy a felhasználó / beteg számára.
 <b>NOTE</b>	További információk, a működés és a teljesítmény magyarázata.
 <b>SN</b>	Sorozatszám
 <b>REF</b>	Katalógus rendelési szám
	Gyártási dátum
 <b>LOT</b>	LOT szám
	Földelés
	B típusú alkatrész
	Biztosíték
	Elektromos hulladék, ne dobja ki háztartási hulladékként!
	Száraz helyen tárolja
	Hőmérséklet korlátozás -20°C - 55°C
	Páratartalom korlátozás 20% - 80%
	Atmoszférikus nyomás korlátozás 70kPa - 106kPa
	A gyártó logója
	CE minősítés
	Minősített képviselő az Európai Unióban
	Nézze meg a használati útmutatót

## 3. Használat előtt

### 3.1 Rendeltetésszerű használat

A VacStation segítségével a fogászati eljárások során csökkenthetők a levegőben megjelenő fűró-aeroszolok, abrúziós porok és higanygőzök.

Ezt az eszközt csak kórházi környezetben, klinikán vagy fogorvosi rendelőben képesített fogorvosi személyzet használhatja.

### 3.2 Biztonsági útmutató

1. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.
2. Használat közben a VacStation-t mindenképpen egyenesen kell állítani. Tilos oldalra vagy fejjel lefele fektetni, mert ez károsíthatja a gépet, illetve lerövidítheti annak élettartamát.
3. Szűrő csere közben figyeljen oda, hogy a gumikeret lapos maradjon, máskülönben levegő szivárgás léphet fel és az elszívás ereje csökkenhet.
4. A csat használata közben figyeljen oda, hogy megfelelő erővel nyomja le a felső részt és csak ezután rögzítse, máskülönben a csat kárt szenvedhet.
5. A fő szűrő súlyos, ezért cseréje közben legyen óvatos. A VacStation súlyos, ezért mozgatása közben legyen óvatos.
6. Az elsődleges filter cseréje során figyeljen oda, hogy a vastag oldal a szűrő felé, a vékony pedig a levegő beömlőnyílás felé nézzen.



#### FIGYELEM !

1. Az eszköz képes a levegőben található vírusokat és baktériumokat csapdába ejteni a levegő elszívása közben. Felhívjuk figyelmét, hogy azon vírusok és baktériumok terjedését melyek nem jutnak át a szűrőn az eszköz nem tudja megakadályozni.
2. A készüléket ne helyezük nedves környezetbe, vagy bármely olyan helyre ahol folyadékkal érintkezhet.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen, vagy közvetett hőforrásoknak. A készüléket biztonságos környezetben kell tárolni és üzemelni.
4. A készülék különleges óvintézkedéseket igényel az elektromágneses kompatibilitással (EMC) kapcsolatban, és az EMC információk szigorú betartásával kell felszerelni és működtetni. Különösen ne használja a készüléket fluoreszcens lámpák, rádióadók, távirányítók és kórházban található magas frekvenciás sebészeti eszközök mellett.

A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (ideértve a külső eszközöket, például antenna kábelek és a külső antennák) csak 30 cm távolságra használhatóak a VacStation bármely alkatrészéhez viszonyítva, beleértve a gyártó által megadott kábeleket is, máskülönben a készülék teljesítménye romolhat. Vegye figyelembe a meghatározott üzemeltetési és tárolási feltételeket.

5. Ha a használat során hiba lép fel az eszközzel kapcsolatban, kapcsolja ki, majd keresse fel a forgalmazót.

6. Soha ne nyissa fel és ne javítsa a készüléket, ellenkező esetben a jótállás érvénytelenné válik.

## 4. A VacStation telepítése

### 4.1 A védőhab eltávolítása

A gép első használata előtt kérjük, távolítsa el a főszűrő alján szállításvédelem érdekében található habot, máskülönben a gép nem fog megfelelően működni. A hab eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.



Lépés	Rajz	Leírás
1		<b>Távolítsa el a felső fedelet:</b> Nyissa ki a négy csatot (kék nyilakkal jelölve) majd távolítsa el a felső fedelet.
2.		<b>Vegye ki a fő szűrő-szerelvényt:</b> Vegye ki sorrendben a tömítő szalagot és a szűrőelemeket. Ezután vegye ki a főszűrő szerelvényt (amelyet a szaggatott vonal jelez).
3		<b>Távolítsa el a habot:</b> Vegye ki a fő szűrőelem aljára felszerelt habot. A hab a helyi törvények és rendeletek szerint eldobható.
4		<b>Szerelje be a motorházat:</b> Helyezze be az alkatrészeket sorrendbe, és rögzítse a négy csatot.

## 4.2 Telepítés

1		<p><b>Az elszívó felszerelése:</b> Csavarozza fel az anyacsavart és rögzítse az elszívót az irányított vezetékhez.</p>
2		<p><b>Irányított légcsatorna felszerelése:</b> Csatlakoztassa az irányító vezeték a felső fedélhez.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> <b>NOTE</b></p> <p><b>Az irányító vezeték függőlegesen kell felhelyezni, különben a szívóképesség romlik.</b></p> </div>
3		<p><b>Tápkábel csatlakoztatása:</b> Helyezze be a tápkábel egyik végét a motorházába, a másik végét pedig a konnektorba.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> <b>NOTE</b></p> <p><b>Csak az eredeti kábelt használja!</b></p> </div>
4		<p><b>Légmennyiség-szabályzó csatlakoztatása:</b> Csatlakoztassa az összekötő vezeték egyik végét a levegő mennyiség szabályozóhoz, a másik végét pedig a motorházhoz, a képen látható módon.</p>



## 5. Felhasználói interfész

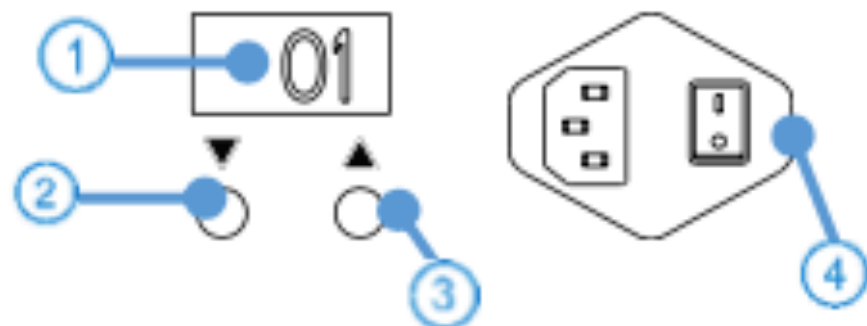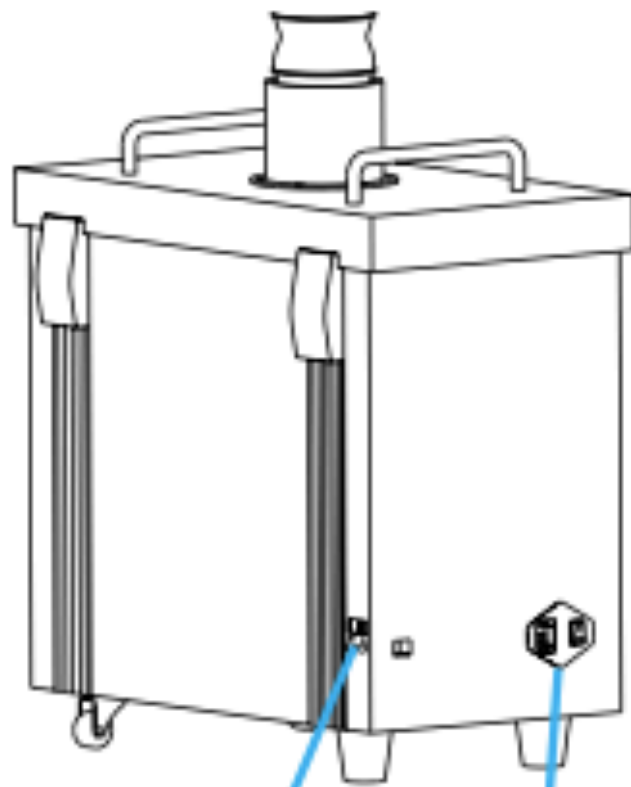

1. Kijelző
2. Levegő mennyiség csökkentése
3. Levegő mennyiség növelése
4. Kapcsológomb

### Bekapcsolás

Bekapcsoláshoz kattintsa felfelé a 4-es gombot.

### Levegőmennyiség növelése


A 3-as gombot nyomva változtatható a levegő mennyisége 1-től 10-ig.

### Levegőmennyiség csökkentése

A 2-as gombot nyomva változtatható a levegő mennyisége 10-től 1-ig.

### Kikapcsolás

Kikapcsoláshoz kattintsa lefelé a 4-es gombot.

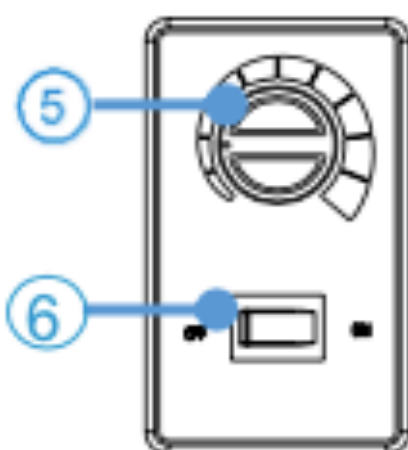

1. Mennyiség szabályozó
2. Kapcsológomb

### A szabályozó bekapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja meg a 6-os gombot.

### Mennyiség szabályozó

Forgassa el a mennyiség-beállító gombot az óramutató járásával megegyezően, hogy a levegőmennyiség 1-ről 10-re, illetve az óramutató járásával ellentétesen, hogy 10-ről 1-re változzon.

### A szabályozó kikapcsolása

Kikapcsoláshoz nyomja meg a 6-os gombot.

## 6. Beállítások



### WARNING

A motor károsodásának elkerülése érdekében ne blokkolja a levegő bemeneti nyílását. Ha a szűrő eltömődött, kérjük, azonnal cserélje ki, hogy elkerülje a motor károsodását.



### NOTE

Az első használat előtt mindenképpen távolítsa el a főszűrő alá helyezett habot.

A csat használatakor feltétlenül nyomja lefelé erősen a felső részt, és csak ezután rögzítse, különben a csat megsérülhet.

Rögzítse az irányított légcsatornát, majd állítsa be a csatorna irányát a különböző eseteknek megfelelően.

Csatlakoztassa az áramellátást és kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Ilyenkor a kijelzőn megjelenő érték az utolsó kikapcsolás előtt beállított légmennyiség értéke lesz.

Indításkor a kijelző két számjegyű értéket mutat, jelezve a légmennyiség tartományát: 01-10-ig. Ha 3 percen belül nem történik semmilyen művelet (beleértve a szabályozó és a gép ▲ vagy ▼ gombjának nyomását), akkor a kijelzőn halmozott áramlási érték fog megjelenni. Ez az érték három számjegyű (áramlási érték: amikor a ventilátor 5,76 millió fordulattal forog, akkor az összesített érték 001, amely 5,76 millió fordulat többszöröseként halmozódik fel.)

### 6.1 A levegőmennyiség beállítása

Összesen tíz féle (1-10) légmennyiség állítható be. A levegő mennyiségének beállításához kattintson a ▲ vagy ▼ gombra. Amikor a megjelenő érték 01, akkor a levegőmennyiség a legkisebb; amikor 10, akkor a levegőmennyiség a legnagyobb.

### 6.2 A légmennyiség-szabályozó csatlakoztatása

Ha a légmennyiség-szabályozó csatlakoztatva van, akkor a gép ▲ vagy ▼ gombja nem működik: ilyenkor a levegőmennyiséget csak a vezérlőn lehet beállítani. Ha a légmennyiség nagy, a gép szívóképessége erős, ezért javasoljuk, hogy nagy levegőmennyiség mellett dolgozzon.

## 6.3 Kikapcsolás


Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a légmennyiség-szabályzó főkapcsolóját „KI” oldalra nyomja. Az áramellátás lekapcsolásához nyomja meg a motorházon lévő főkapcsolót.



### **WARNING**

Bizonyos esetekben (mint például amikor az elszívó hőmérséklete sokkal alacsonyabb mint a vízé) kondenzvíz jelenhet meg az elszívóban. Ilyenkor 15-30 percig ne használja a készüléket és bizonyosodjon meg róla, hogy nem került víz az irányított légcsatornába és a szívófejbe.

## 7. Karbantartás

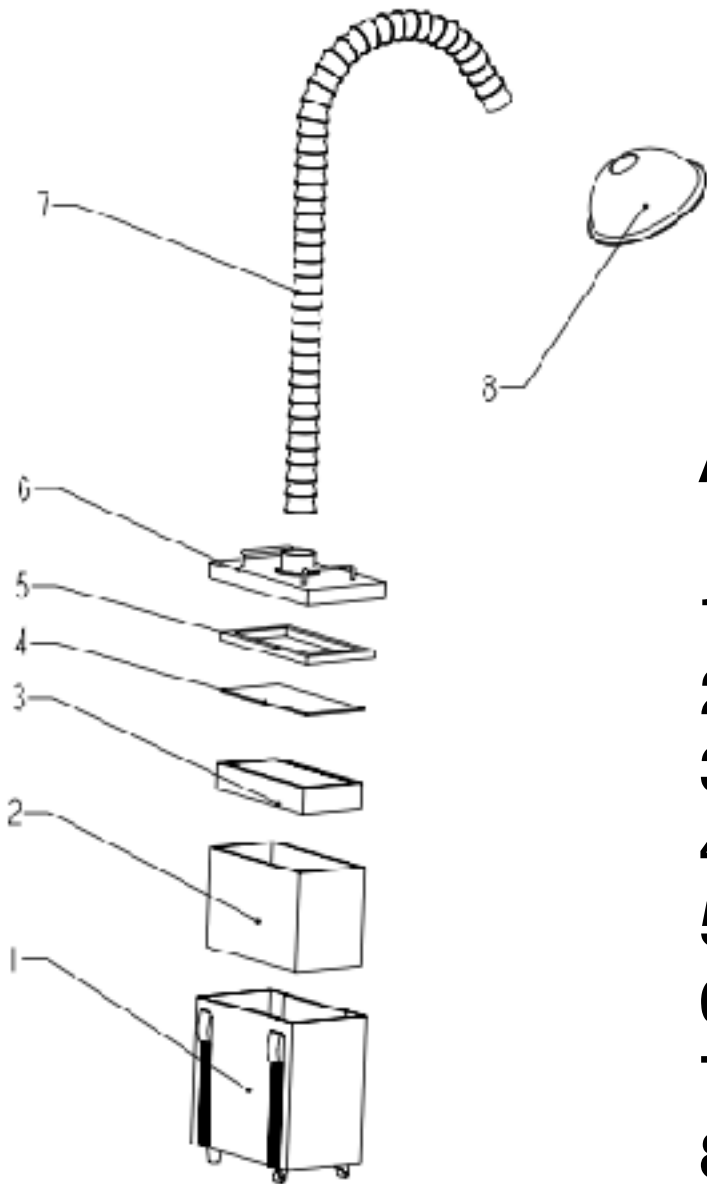

Az ábrán szereplő alkatrészek:

1. Motorház
2. Főszűrő szelvény
3. Másodlagos szűrő szelvény
4. Elsődleges szűrő pamut
5. Gumi betét
6. Felső fedél
7. Irányított légcsatorna
8. Szívófej

### 7.1 Tisztítás és fertőtlenítés


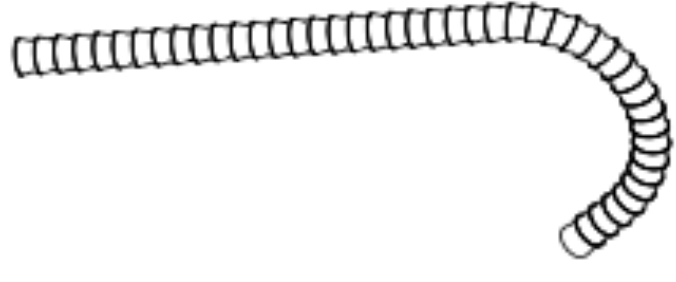

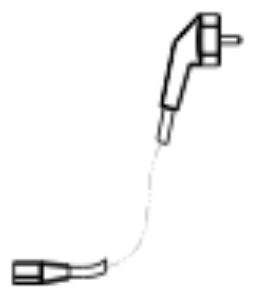


#### 7.1.1 Használat előtt

Higiéniai és egészségügyi szempontból az összetevőket minden használat előtt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Ez egyaránt vonatkozik az első, valamint a következő felhasználásokra is. Az alkatrészeket (irányított légcsatorna, motorház, tápkábel és légmennyiség-szabályozó) a használatnak megfelelően rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell. Vegye figyelembe a tisztításra és a fertőtlenítésre vonatkozó nemzeti irányelveket, szabványokat és követelményeket.

Az újra használat számát az eszköz funkciója / kopása határozza meg. Anyagromlás jelei esetén a készüléket már nem szabad újra felhasználni. Sérülés esetén a készüléket vissza kell juttatni a gyártóhoz javításra.


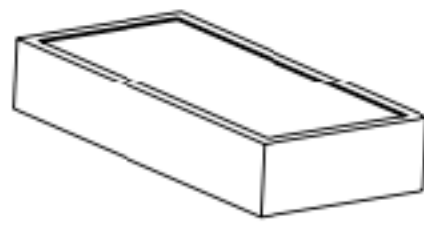
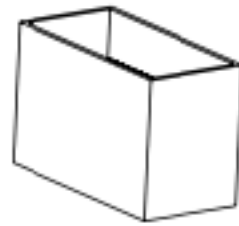
#### 7.1.2 A légmennyiség-szabályozó csatlakoztatása

- A felhasználó felelős a termék sterilitásáért, valamint a sérült és piszkos eszközök használatáért. Az eszközt sterilizálás után kell használni!
- Saját biztonsága érdekében viseljen személyi védőfelszerelést (kesztyűt, védőszemüveget stb.).
- Csak olyan fertőtlenítő oldatot használjon, melynek hatékonysága bizonyított (VAH / DGHM-listázás, CE-jelölés és FDA jóváhagyás), valamint ezt használja a fertőtlenítő oldat gyártójának utasításai szerint.
- A vízminőségnek megfelelőnek kell lennie a helyi előírásoknak.
- Ne használjon fehérítőt vagy klorid tartalmú fertőtlenítőszeret.

<b>Fertőtlenítendő alkatrészek</b>		
<p>Elszívó fej</p> 	<p>Írányított légcsatorna</p> 	<p>Motorház</p> 
<p>Tápkábel</p> 	<p>Légmennyiség szabályozó</p> 	
<p>Törölje le az összes felületet legalább 2 percig fertőtlenítésre használt etanollal (70-80 térfogat%) enyhén megnedvesített ruhával, ismételje meg ötször.</p>		
<p> <b>NOTE</b></p> <p>A fertőtlenítéshez csak etanolt használjon (70-80 térfogat%) Ne használjon túl sok etanolt, mert bekerülhet a gépbe és tönkre teheti a benne lévő alkatrészeket.</p>		

## 7.2 Szűrő csere

### 7.2.1 Szűrőcsere gyakorisága

Szűrő	Gyakoriság	
	Tartósság	Halmazódás
Elsődleges szűrő pamut 	1 hónap	010 és annak szórzóí
Másodlagos szűrő szelvény 	3-6 hónap	030 és annak szórzóí
Főszűrő szelvény 	6-12 hónap	060 és annak szórzóí



A fertőtlenítéshez csak etanolt használjon (70-80 térfogat%) Ne használjon túl sok etanolt, mert bekerülhet a gépbe és tönkre teheti a benne lévő alkatrészeket.

Cserélje ki a megfelelő szűrőt, ha a használati idő vagy felhalmozódó áramlás miatt szükséges. Amikor a LED-ablakban a "□" jelzés köröz, a szűrőt ki kell cserélni.

### 7.2.2 Hogyan cseréljük a szűrőt

Engedje fel a négy csatot a gép felső burkolatának szélén, és egymás után vegye le a felső burkolatot, az elsődleges szűrő pamutot, a másodlagos szűrő szelvényt és a fő szűrőt. Cserélje ki a főszűrőt. Ellenőrizze, hogy az új főszűrő megfelelően van-e elhelyezve, és a szűrő aljára csatlakoztatott ventilátorba be van-e vezetve az áram.



Szűrő csere előtt mindenképpen kapcsolja ki az eszközt!

## 8. Hibaüzenetek

Probléma vagy meghibásodás esetén kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatban, mit jelent az adott hibaüzenet. Ha a problémát vagy a hibát nem sikerül megoldani, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Üzenet	Ok	Megoldás
Az "OFF" felirat villog a kijelzőn és a "□" jel az óramutató járásával megegyezően mozog, azt jelenti a ventilátor leállt.	A levegő bemeneti nyílása teljesen el van zárva.	Kapcsolja ki a készüléket, majd ellenőrizze, hogy az irányított légcsatornában és az elszívóban nincs-e idegen test. Ha igen, tisztítsa meg őket. Ha a probléma így sem oldódik meg, nyissa fel a felső fedelet, és ellenőrizze, hogy nem került-e idegen anyag az eszköz belsejébe, amely akadályozza a készülékben a levegő áramot. Ha igen, tisztítsa meg. Ezeket a lépéseket követően indítsa újra a gépet, és egy perc elteltével figyelje meg, hogy továbbra is riaszt-e. Ha igen, cserélje ki a szűrőt.
A LED ablakon megjelenő "ERR" jelzés azt jelenti, hogy a ventilátor és a motor leállt.	Hiba a ventilátorban, vagy a tápvezetékben.	Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a gépet, hogy ellenőrizze, működik-e megfelelően. Ha nem, ellenőrizze a ventilátort.

## 9. Műszaki adatok

Gyártó	Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
Modell	VacStation
Méreték	53cm x 46 cm x 60 cm±1 cm(Package)
Csatlakozás	Φ75mm×1500 mm
Súly	21kg±10%
Bemenet	220-240V AC for European Standard/100-120V AC for American Standard
Frekvencia	50/60Hz
Energia	250W Max
Szűrő hatékonyság (0.3um)	99.97%
Statikus nyomás	3000Pa
Fújási sebesség	14m/s
Volumen	3.7m <sup>3</sup> /min
Elektromos biztonsági besorolás	Class I
Besorolás	B
Üzemeltetési feltételek	Használat: zárt térben Környezeti hőmérséklet: 5 ° C ~ 40 ° C Relatív páratartalom: <80% Működési magasság <3000m a tengerszint felett
Szállítási és tárolási feltételek	Környezeti hőmérséklet: -20 ° C ~ +55 ° C Relatív páratartalom: 20% ~ 80% Légköri nyomás: 70 kPa ~ 106 kPa



## 10. EMC táblák

### Útmutató és a gyártó nyilatkozata készülék elektromágneses sugárzásáról


Az Vac-Station készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való felhasználásra szánják. Az E-connect S vevőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt	Megfelelőség	Elektromágneses környezet -útmutató
RF emissions CISPR 11	Group 1	Az VacStation csak a belső működéséhez használja az RF energiát. Ezért az RF kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz zavart a közeli elektronikus berendezésekben.
<b>RF emissions CISPR 11</b>	Class B	Az VacStation minden létesítményben használható,
Harmonic emissions IEC61000-3-2	Nem alkalmazható	ideértve a háztartási létesítményeket és azokat,
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Nem alkalmazható	amelyek közvetlenül kapcsolódnak a háztartási célokra szolgáló épületeket ellátó alacsony feszültségű nyilvános hálózathoz.

## Útmutató és a gyártó nyilatkozata készülék elektromágneses védeltségéről

Az VacStation készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való felhasználásra szánják. Az E-connect S vevőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használják.

Immunitás teszt teszt	IEC 60601 teszt sziont	Megfelelősségi szint	Elektromágneses környezet - útmutató
Elektrostatic discharge ( ESD ) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt  ± 2,4,8,15 kV levegő	± 8 kV kontakt  ± 2,4,8,15 kV levegő	A padlónak fa, beton vagy kerámia cserépből kell lennie. Ha a padlót műanyag borítja, a relatív páratartalomnak legalább 30% -nak kell lennie.
Electrical fast transients/bursts IEC 61000-4-4	±2 kV , 100kHz ismétlési frekvencia	±2 kV , 100kHz ismétlési frekvencia	A hálózati áramellátásnak tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek kell lennie.
Surge IEC 61000-4-5	± 0,5kV, ±1 kV vezeték és vezeték között  ±0,5Kv, ±1 kV, ± 2kV vezeték és föld között	± 0,5kV, ±1 kV vezeték és vezeték között  ±0,5Kv, ±1 kV, ± 2kV vezeték és föld között	A hálózati áramellátásnak tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek kell lennie.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, and 315°  0% UT; 1 cycle and 70% UT; 25/30 cycles sine phase at 0°  0% UT; 250/300 cycle	0% UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, and 315°  0% UT; 1 cycle and 70% UT; 25/30 cycles sine phase at 0°  0% UT; 250/300 cycle	A hálózati áramellátásnak tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek kell lennie. Ha az eszközök felhasználója folyamatos üzemeltetést igényel az áramellátás megszakítása során, akkor ajánlott, hogy az eszközök áramellátása szünetmentes tápegységből vagy akkumulátorból álljon.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz or 60Hz	30 A/m 50Hz or 60Hz	Az elektromos frekvencia mágneses mezőjének egy tipikus helyre jellemző szinten kell lennie egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetben.

Immunitás teszt	IEC 60601 teszt szint	Megfelelőség	Elektromágneses környezet - útmutató
<b>Vezetett RF</b> <b>IEC 61000-4-6</b>	3 V 0.15 MHz – 80 MHz, 6V in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz, 80 % AM at 1 kHz	3V V/m	<p>A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket az VacStation bármely részéhez, beleértve a kábeleket sem, közelebb kell használni, mint az adó frekvenciájára alkalmazandó egyenletből kiszámított ajánlott távolság.</p> <p>Ajánlott távolság számítása:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <math display="block">d = 1.2\sqrt{P}</math> <math display="block">d = 1.2\sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} \sim 800 \text{ MHz}</math> <math display="block">d = 2.3\sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} \sim 2.5 \text{ GHz}</math> </div> <p>ahol P az adó legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W) a gyártó által meghatározva, míg "d" az ajánlott távolság méterben (m)</p> <p>A telepített rádiófrekvenciás adókészülékből származó térerőnek (helyszíni felméréssel meghatározott érték) kisebbnek kell lennie, mint az egyes frekvenciatartományok megfeleléségi szintje.</p> <p>Interferencia léphet föl olyan készülékek közelében melyek az alábbi szimbólummal vannak ellátva:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
<b>Sugárzott RF</b> <b>IEC 61000-4-3</b>	3 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz, 80 % AM at 1 kHz	3 V/m	

## Ajánlott minimum távolságok

Manapság sok rádiófrekvenciás vezeték nélküli készüléket használnak különböző egészségügyi helyszíneken orvosi berendezésként. Ha ezeket a rádiófrekvenciás készülékeket az orvostechnikai felszerelések és / vagy rendszerek közvetlen közelében alkalmazzák, akkor azok alapvető biztonságát és teljesítményét befolyásolhatják. A VacStation-t az alábbi táblázatban ismertetett immunitási teszttel tesztelték, amely megfelel az IEC 60601-1-2: 2014 vonatkozó követelményeinek. Az ügyfélnek és / vagy a felhasználónak az alábbiak szerint ajánlott minimális távolságot tartania a rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs berendezés és a VacStation között.

Test frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	Maximum power (W)	Distance (m)	Immunity test level (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Pulse modulation 18Hz	1.8	0.3	27
450	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0.3	28
710	704-787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217Hz	0.2	0.3	9
745						
780						
810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18Hz	2	0.3	28
870						
930						
1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3,4,25; UMTS	Pulse modulation 217Hz	2	0.3	28
1845						
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217Hz	2	0.3	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217Hz	0.2	0.3	9
5500						
5785						



**WARNING**

A VacStation gyártója által megadottaktól eltérő kiegészítők és kábelek használata megnöveli az elektromágneses sugárzást vagy csökkentheti a VacStation elektromágneses immunitását, valamint nem megfelelő működést eredményezhet.

Kábel információk:

Cable Name	Cable Length (m)	Shielded or not	Remark
Adapter	1.8	No	/

Kerülni kell a VacStation más berendezések melletti használatát, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha mégis ilyen jellegű felhasználásra van szükség, előzetesen ellenőrizni kell, hogy a VacStation-t és a többi berendezés megfelelően működnek-e.

# 11. Nyilatkozat

## Élettartam

A VacStation termékek élettartama 3 év.

## Karbantartás

A GYÁRTÓ áramköri rajzokat, alkatrész-listákat, leírásokat és kalibrálási útmutatókat biztosít a termékek, a javításában való segítség éppen a SZERVIZ SZEMÉLYET részére.

## Felszámolás

A csomagolás újra hasznosítható. A készülék fém alkatrészeit fémhulladékként kezelik. A szintetikus anyagokat, az elektromos alkatrészeket és a nyomtatott áramköri táblákat elektromos hulladékként kezelik. Kérjük, az eszköz felszámolásakor vagy figyelembe a helyi környezetvédelmi törvényeket és rendeleteket.

## Jogok

A termék minden joga a gyártóhoz tartozik. A képek csak tájékoztatás céljára szolgálnak. Minden jog a CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD-t illeti. Az ipari formatervezés, a belső szerkezet stb. a SIFARY szabadalma, minden másolat vagy hamis termék jogi következményekkel jár.



## Changzhou Eighteeth Medcial Technology Co., Ltd


Add: NO.99 Qingyang Road Xuejia Town, Xinbei District Changzhou City, 213125,  
Jiangsu Province, China

Tel: +86-0519-85962691

Fax: +86-0519-85962691

Email: [ivy@sifary.com](mailto:ivy@sifary.com)

Web: [www.eighteeth.com](http://www.eighteeth.com)

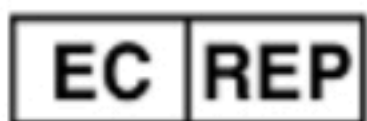

Berwin Industy Ltd.

Tel: +44 0208 492 6388

Fax: +44 0208 492 0196

Add: 419, Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, B15 3LB.

William Jefferson

[Christophe.strole@yahoo.com](mailto:Christophe.strole@yahoo.com)

Version: A0

BKY-CE-60-1007

Issued: Mar. 26, 2018

Copyright © Eighteeth Ltd, 2016.

All rights reserved.

Magyarországi forgalmazó:  
Dr Volom Dental & Medical kft.  
1055 Budapest, Nyugati tér 9.  
E-mail: [shop@drvolomdental.hu](mailto:shop@drvolomdental.hu)  
Web: [volomshop.com](http://volomshop.com)  
tel.: +36-1-311 65 84

A magyar fordítás jogtulajdonosa a Dr Volom Dental & Medical kft.  
A szöveg bármely médiumban történő terjesztése, sokszorosítása,  
módosítása kizárólag a jogtulajdonos írásos engedélyével történhet.