

Az intraorális homokfúvó

használata és ápolása

Használata:

- A tasak felé soha ne irányítsuk a fúvóka végét!
- Mindig védjük a parotis kivezető csövének nyílását a portól, víztől, levegőtől!
- A betegre érdemes nagy előkét tenni, szemére szemüveg, hajára hajháló kerüljön.
- A kezelő személyzet is védje magát plexivel vagy szemüveggel!
- Tetszés szerint állítsák be rajta a víz mennyiségét. Inkább közepes mennyiség az optimális.

Ápolása:

- Tilos olajozni a kézi darabot spray-vel vagy géppel !
- Gumitömítéseket használat előtt és után le kell tisztítani, be lehet kenni vazelinnal vagy olajjal.
- A por csak működésnél legyen a kézi darabban, utána tegye vissza a flakonba, páramentesen! Ha víz éri, összeáll a por és használhatatlan lesz.

Használat után:

- 1, A port vegye ki!
- 2, Vízzel járassuk 30 mp-ig.
- 3, Víz nélkül járassuk, míg már csak száraz levegőt fúj.
- 4, Fúvókát és a csövet szét kell szedni, tisztító tűkkel áttisztítani, fertőtleníteni, szárazra törölni.

Sok sikert a használatához!