

Fotopolimerizációs LED polimerizációs lámpa

COXO Latte db-686

Használati Útmutató

1. Biztonsági figyelmeztetés
 - a. A terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni. Kérjük, mindig szigorúan tartsa be az itt szereplő instrukciókat.
 - b. Soha ne nézzen bele a lámpa fényébe megfelelő védelem nélkül, mivel ez károsítja a szemet.
 - c. Kérjük, eredeti alkatrészeket használjon a termékhez, mind a fényvezető szál, a töltő és az akkumulátor tekintetében. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, melyeket más, általunk nem támogatott alkatrészek használata eredményez.
 - d. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a lámpa tartójára, kivéve a használati utasításban felsoroltakat.
 - e. Ne használja a lámpát olyan betegnél, akinek pacemakere van.
2. Standard konfiguráció
 - a. Az első használatot megelőzően ellenőrizze a kiegészítőket, kérjük, győződjön meg róla, hogy mindegyik ép.
3. Felépítése
 - a. A lámpa fényforrása LED, kék fényt bocsát ki adott hullámhosszon, mely fény hatására a kompozit tömőanyag megköt.
 - b. A készülék főbb részei: nagy teljesítményű LED, fényvezető szál és a fő egység.
4. Használat:
 - a. Vegye le a piros kupakot a fényvezető szálról, majd a fém kupakot helyezze a kézi darab megfelelő nyílásába.
 - b. Helyezze a fényvédő lencsét a fényvezető szál végére.
 - c. Nyomja be a „Time” feliratú gombot az idő beállításához. (5, 10, 15 vagy 20 másodperc)
 - d. Nyomja be a „Mode” gombot, hogy válasszon a különböző üzemmódok közül: teljes, villogó vagy egyre erősödő (csak a DB-686 Cappu/Mocha modellnél)
 - e. Használatkor irányítsa a lámpát a megvilágítandó felületre, nyomja meg az „On/Off” gombot, ekkor a készülék hangjelzést ad. A kék fény bekapcsol, a digitális kijelzőn pedig elindul a visszaszámlálás egészen 0-áig, amikor a lámpa kikapcsol.
 - f. Használat után tisztítsa meg a fényvezető szálát pamut ruhával.

- g. A megvilágítás mélysége kompozitoknál 10 másodperc alatt 3 mm.
- h. A fényvezető szál 360 fokban elfordítható és 135 fokig autoklávozható.
- i. Ha működés közben kigyullad az akkumulátort jelző fény, az alacsony töltöttségi szintet jelent, tegye töltőre a készüléket.
- j. Amennyiben tölteni kell a lámpát, csatlakoztassa a konnektorhoz a töltőt, helyezze a kézi darabot a bázisba, a bázison világító fény tájékoztat minket a töltés állapotáról. A piros fény jelenti azt, hogy az akkumulátor töltés alatt van, a zöld pedig a töltés befejezését jelenti. A töltési idő kb. 4 óra.
- k. Az akkumulátor bármennyiszer újratölthető.
- l. Az első töltés tartson legalább 8 órán keresztül.

5. Karbantartás és javítás

- a. Javasoljuk, hogy az első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsen a készüléket.
- b. A kézi darab és a kiegészítők alkohollal vagy semleges tisztítószerrel tisztíthatóak. Maró vagy dörzsölő tisztítószer használata tilos! Ultrahangos tisztítás tilos!
- c. Kerülje a kemény felületekkel történő érintkezést a karcolások elkerülése érdekében. Használat után ellenőrizze, hogy nincs-e anyagmaradék rajta. Amennyiben van, műanyag eszközzel próbálja meg eltávolítani, ne használjon fémet! Ha a fényvezető szál megsérül, cserélje ki.
- d. A fényvezető szál tisztítható alkohollal és sterilizálható 135 fokig.

6. Problémák megszüntetése

- a. Ha a készülék működésében probléma jelentkezik, hívja ügyfélszolgálatunkat, és ellenőrizze az alábbiakat:
 - i. Hiba: Kézi darab nem működik
 - a. Lehetséges okok:
 - i. Akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
Megoldás: töltse fel az akkumulátort.
 - ii. A hővédő rendszer bekapcsol. Hibakód: oU
Megoldás: Pár percig ne használja a készüléket.
 - iii. A LED megsérült. Hibakód: Er
Lépjön kapcsolatba velünk vagy a gyártóval.
 - ii. Nem megfelelő a fényerősség
 - a. Lehetséges okok:
 - i. A fényvezető szál nincs megfelelően behelyezve a kézi darabba. Megoldás: helyezze be megfelelően.
 - ii. A fényvezető szálban rés keletkezett. Megoldás: cserélje ki a fényvezető szálát.
 - iii. Tömőanyag maradt a fényvezető szálon.
Megoldás: Tisztítsa meg a fényvezető szálát.
 - iv. Az akkumulátor kapacitása nem megfelelő.
Megoldás: cserélje ki a kézi darabot.

7. Termékinformációk és technikai paraméterek

- a. Töltő: 100-240 Vac, 50/60Hz, DC 5V/1.5A

- b. Li-ion akkumulátor: feszültség: DC3.7V, kapacitás: 2200 mAh
- c. LED: max. 6W, hullámhossz: 420-480 nm, fényerősség: >1200W/cm
- d. Fényvezető szál átmérője: 8 mm

8. Szállítás és tárolás

- a. Hőmérséklet: -10C~+55C
- b. Relatív páratartalom: nem több, mint 90%
- c. Légköri nyomás: 50~106KPa

9. Garancia

A garancia a vásárlás napjától érvényes.

A kézi darabra és a bázisra 12 hónap, a töltőre 6 hónap, az akkumulátorra 6 hónap a jótállási idő.

A fényvezető szálra és fényvédő lemezre nincsen jótállás.

A garancia rendeltetésszerű használatra vonatkozik. Bármilyen átalakítás vagy balesetből eredő károsodás megszünteti a garanciát.