



## perform®

A granulátum oldásakor a vízben felszabaduló **aktív oxigén** hatásán alapuló nagy hatékonyságú készítmény, felületek és eszközök kombinált fertőtlenítésére.

### Amit nyújt

- Széles mikrobiológiai hatásspektrum (sporocid);
- Oxigén bázisú = zárt térben sincs levegőszennyeződés;
- Kiváló tisztító hatás és jó szennyoldó képesség (pl.: vérfoltoknál);
- EU szabványok alapján tesztelt;
- Fogászati lenyomatok fertőtlenítésére is használható.

### Alkalmazási terület

- Használható gyógyászati eszközök tisztítására (CE 0297), fertőtlenítésére és egyéb felületekre pl. fogászati lenyomatok fertőtlenítésére. A perform® használható minden olyan területen, ahol széles hatásspektrumú felhasználóbarát fertőtlenítőszer szükséges, mely nem okoz környezeti levegőszennyeződést például:
  - kórházak, főként intenzív osztály, műtő;
  - rendelők, fogászatok;
  - gyógyszeripar és kozmetikai ipar.

- Mivel a munkaoldat jó anyag kompatibilitással rendelkezik, ezért a perform® használható „problémás” felületeken is, mint például akrilüveg (inkubátorok) és fogászati lenyomatok.
- A perform® szintén használható lélegeztető csövek és oktatótárgyak fertőtlenítésére.

### Mikrobiológiai hatásspektrum

A perform®

- baktericid (MRSA, TBC),
- virucid (HIV, HBV, adeno-, rota-, vaccina-, polio-, papova SV40 vírus)
- sporocid hatással rendelkezik.

### Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
40 g-os zacskó	50 x 40 g	122304
900 g-os vödör	4 x 900 g	122322

## Behatási idők és alkalmazási módok

Behatási idők	1p	5p	10p	30p	60p	2óra	4óra
DGHM* listája alapján felületfertőtlenítés kórházakban és rendelőkben				1% (10g/l)	0,5% (5g/l)		0,25% (2,5 g/l)
ÖGHMP listája alapján N° 95/14				1% (10g/l)	0,5% (5g/l)		0,25% (2,5g/l)
TBC				3% (30g/l)	2% (20g/l)		1,5% (15g/l)
Vírusok - adenovírus - poliovírus - vaccína - HBV/HIV - papova SV40 - rota	0,5% 0,5%	0,5%	2%	1%	0,5%		0,25%
Spórák (DIN EN 13697 norma alapján)						1%	
Mosdók, kádák rövid behatású fertőtlenítése		1,5%	0,75%				
RKI lista besorolás a német felületfertőtlenítésre vonatkozó törvény §18 IfSG bekezdése alapján							3%
Fogászati lenyomat fertőtlenítés			2%				

\* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

\*\* Osztrák Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

PREMIUM EU FURRO NORM	Perform az EU normáknak megfelelően az ipari, élelmiszer-ipari és intézményi területeken a következő behatási idővel tesztelt	30p	60p
		EN 13697	Mennyiségi felületi teszt baktericid hatásra
EN 13697	Mennyiségi felületi teszt fungicid hatásra		1%

## Termék adatok

### Összetétel:

100 g perform® tartalmaz:

- 20 g kálium-peroxomonoszulfátot,
- 15 g nátriumbenzónátot,
- 10 g borkósavat.

Egyéb összetevők (EU szabályzat alapján):

5-15% anionos tenzid, 5-15% nemionos tenzid és kevesebb mint 5% szappan és foszfónát.

### Kémiai / fizikai adatok

Granulátum	
Megjelenés	fehéres-sárgás por
Fajsúly	kb. 875 g/l
Illat	friss
Hőmérséklettűrési	-5°C-tól szobahőmérsékletig
Munkaoldat	
Megjelenés	Szintelen, átlátszó folyadék
pH érték (vezetékes vízben)	kb. 4,0
Illat	friss

### Kémiai összetevők (folyamat)

A granulátum egy oxidáló összetevőt tartalmaz (kálium-peroxomonoszulfát), ami vízben történő feloldáskor aktiválódik, és aktív oxigént eredményez.

Ezalatt a folyamat alatt semmiféle peroxoacetic acid (sav) nem képződik. Az elkészített munkaoldat aktív hatóanyagai a 30 órás állásidő (élettartam) alatt állandóak. A tökéletes egyensúlyban lévő tisztító és kalcium stabilizáló összetevők védelmet nyújtanak a mikroorganizmusok ellen és kiváló tisztítóhatást eredményeznek, figyelmen kívül hagyva a vízkeménységét.

## Alkalmazás módja

Munkaoldat elkészítéséhez engedjünk megfelelő mennyiségű lehetőleg kézmeleg vizet kádba, vagy vödörbe. Szórjuk bele a granulátumot a vízbe, majd egyszer keverjük meg az oldatot. Például:

- 1 x 20 g (1 kanál) 1 l vízhez = 2%-os oldat (fogászati lenyomat fertőtlenítéshez),
- 1 x 40 g (1 zacskó v. 2 kanál) 8 l vízhez = 0,5%-os oldat,
- 2 x 40 g (2 zacskó v. 4 kanál) 8 l vízhez = 1%-os oldat (felületfertőtlenítéshez).

Padló felmosásához alkalmazzunk két mopos rendszert. Vigyük fel a munkaoldatot egy moppal majd a behatási idő után nedves moppal töröljük fel. Gyógyászati eszközök és egyéb letörölhető felületek / tárgyak fertőtlenítéséhez munkaoldattal benedvesített rongyot használjunk.

Ügyelni kell a kezelt felület egyenletes benedvesítésére és utántörülésére.

Maszkok és oktatótárgyak fertőtlenítésére esetén merítsük bele a szétszedett alkatrészeket a munkaoldatba, majd a behatási idő után, öblítsük le vízzel. Végül töröljük a tárgyakat szárazra.

Habár a perform® granulátum semmiféle klórt vagy klór származékot nem tartalmaz. A különböző minőségű csapvíz miatt, a munkaoldatban felszabaduló aktív oxigén esetlegesen klórhoz hasonló szagot eredményezhet.

A perform® kiváló tisztító hatással rendelkezik, ezért nem kell egyéb tisztítószerrel, hatásfokozó adalékokkal keverni.

Az elkészített munkaoldatot 30 óra után mindenképpen cserélni kell! Erős szennyeződések eltávolítására készítsünk friss oldatot!

Takarító- és permetezőgépekben is jól alkalmazható.

## Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti jelölés

**Xi:** Irritatív

**R36/38:** Szem- és bőrizgató hatású.

**S26:** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

**S28:** Ha bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni!

## Figyelmeztetés

- Mindig tartsuk be a használati utasításokat!
- Ne tároljuk a granulátumot szobahőmérséklet feletti hőmérsékleten!
- Védőkesztyű használata javasolt.
- A munkaoldat kényes textilszínezékekre fehéritő hatással lehet. Padlószőnyeggel borított felületekre nem alkalmazható.